

NÁVOD K POUŽITÍ

Nylon sterilization pouches

Sterilizační sáčky nylon pro horkovzdušnou sterilizaci

Samolepicí sáčky z materiálu nylon vhodné pro sterilizaci při teplotách do 180°C

Popis:

Jednorázové sterilizační sáčky určené pro horkovzdušnou sterilizaci. Materiál: nylon

Návod k použití:

Odstraňte prosím papírový proužek, vložte nástroj do obalu a přeložte dle vyznačené linie. Sáček takto stiskem zalepte. Na obal umístěte procesový indikátor, jež je součástí dodávky. Naplněné obaly s nástroji skládejte vedle sebe na připravené tácy, nikdy však na dno sterilizátoru, kovové podložky nebo síta, ale na teplu odolné podložky, například skleněné a pod.

Teplota nesmí překročit hranici 190°C. Optimální plnění doporučené výrobcem: do 70 % objemu sáčku
Exspirace vysterilizovaného materiálu se řídí pokyny dle Vyhlášky 306/2012 Sb.

Po provedené sterilizaci ponechejte sterilizátor vychladnout na cca 80°C a teprve potom jej otevřete a materiál zkontrolujte.

Pro vyjmutí nástroje sáček otevírejte podél vyznačené linie.

Balení: 100 ks

Rozměry:

050 x 250 mm

075 x 250 mm

100 x 250 mm

175 x 260 mm

240 x 330 mm

V souladu s platnou legislativou.

Datum poslední revize: 3. 10. 2019