

### Test mytí Getinge Wash Monitor

Objednací číslo: 200 503 864 600

#### NÁVOD K POUŽITÍ

Getinge Wash Monitor je jednoduchý test určený k hodnocení a běžné kontrole efektivity během mycí fáze v nemocničních myčkách dle ČSN EN ISO 15883.


1. Vložte Wash Monitor štítek do Wash monitor držáku (503864800) aby bylo testovací pole (červená skvrna) částečně viditelné.
2. Umístěte držák s testovacím štítkem do síta s nečistými nástroji **VŽDY TAK, ABY BYL ŠTÍTEK TESTOVACÍ SKVRNOU VZHŮRU**. **NIKDY DRŽÁK NEZAVĚŠUJTE NA OKRAJ SÍTA**. V každém cyklu pozici měňte, volte odlišné umístění jak co do hloubky, tak co do výšky. Překrytá část testovací skvrny simuluje štěrbinu a přeložení nástrojů.
3. Spusťte běžný mycí program. Doporučujeme sledování každé myčky každý den a použití minimálně jednoho Wash monitoru v každé dávce pro běžné záznamy během dne. Držte se však národní legislativy.
4. Na konci cyklu vyjměte Wash Monitor z držáku a zkontrolujte výsledky.
5. Můžete také zaznamenávat umístění testu v myčce na Wash Monitor štítku voděodolným fixem.

**POZOR:** Wash Monitor držák a Wash Monitor štítek mohou být po skončení cyklu horké. Vyjímajte opatrně.


#### Před expozicí



#### Správný výsledek

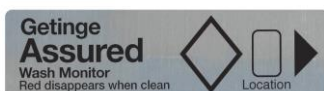

#### CHYBA !!!

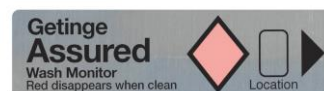

příklad chybného výsledku

#### Interpretace výsledků

Zkontrolujte hliníkové štítky, zda na nich nezůstal červený povrch. Červená skvrna má být úplně smyta, což dokazuje efektivitu mycího cyklu. V případě, že na proužku zůstává větší množství červené barvy, znamená to závažné nedostatky v efektivitě dané myčky. Pokud zůstává na štítcích menší množství červené barvy, jde jen o mírné, mezní nedostatky.

#### BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Nepoužívejte Wash Monitor štítek pokud testovací pole není červené před mycím cyklem.

#### SKLADOVÁNÍ

Uskladněte Wash Monitor v původní ochranné fólii při pokojové teplotě 10° – 38° C a relativní vlhkosti 10-60%. Nevyjímajte testy z plastového sáčku, dokud je nebudete potřebovat. Neumisťujte v blízkosti dezinfekčních prostředků a výparů.

#### EXPIRAČNÍ DOBA

Expirační doba je vytištěna na obalu výrobku. Nepoužívejte po uplynutí doby expirace.

#### INTERFERUJÍCÍ LÁTKY NEBO PODMÍNKY

Nejsou známy žádné interferující látky nebo podmínky, které by mohly ovlivnit zamýšlené použití indikátoru nebo nepříznivě ovlivnit výkon indikátoru.

#### UVOLŇOVÁNÍ TOXICKÝCH LÁTEK

Wash Monitor neuvolňuje žádné známé toxické látky, které by byly nebezpečné pro zdraví nebo ovlivňovaly vlastnosti sterilizovaného materiálu.

#### Podmínky pro mytí

Testy Wash Monitor jsou testovány na mytí alkalycké, enzymatické a PH neutrální. Teplota a ostatní podmínky závisí na konstrukci mycího zařízení. Vlhkost může ovlivnit výsledek testu – nepřipravujte si tedy testovací proužky dopředu, uchovávejte je v uzavřeném balení, při manipulaci s nimi dbejte, abyste měli suché ruce.

V případě, že barevná změna nedosáhne optimální úrovně, proveďte test ještě jednou. Pokud se závada znovu opakuje, vyzkoušejte jiný typ testovacího systému a kontaktujte dodavatele.

#### BALENÍ

Wash Monitor holder/držák – k dispozici na vyžádání

Wash Monitor – 50 ks v balení

Poslední revize návodu: 31.7. 2019