

Des Control

NÁVOD K POUŽITÍ

Testy a indikátory

Test tepelné dezinfekce DesControl, 10 min/93°C nebo 5 min/90°C, samolepicí

Objednací číslo: 253 383 010 093, 005 090

Chemický indikátor Sterim Des Control je určen ke kontrole tepelné dezinfekce v různých typech mycích /dezinfekčních automatů. Vzhledem k použité nové technologii je možno nyní přesně zjistit, zda bylo během dezinfekčního cyklu dosaženo požadovaných parametrů stanovených normou EN ISO 15883.

Indikátor je nanesen na papírovém nosiči a zalaminován. Jasná barevná změna usnadňuje vyhodnocení a ověření parametrů dosažených během cyklu. Požadované zbarvení je na každém jednotlivém testu vyznačeno. Indikátory se vyrábí samolepicí, aby mohly být jednoduše vloženy do vašeho dokumentačního systému, vyžaduje-li to vaše národní legislativa. Jsou k dispozici ve verzích 10 min/93°C a 5 min/90°C.

Návod k použití:

Vložte test do místa s nejnižší teplotou, například u výpustě, do instrumentačního síta. Po ukončení cyklu vyhodnoťte zbarvení indikační skvrny, která musí být při dosažení správných parametrů černá. Pokud to vaše národní legislativa vyžaduje, uchovejte výsledný test pro účely kontroly.

Skladovací podmínky:

Před použitím skladujte výrobek v originálním balení při teplotě 0-10°C. Chraňte před přímým slunečním světlem.

Exspirace:

Datum je uvedeno na každém obalu


Balení:

200 ks

V případě, že barevná změna nedosáhne optimální úrovně, proveďte test ještě jednou. Pokud se závada znovu opakuje, vyzkoušejte jiný typ testovacího systému a teprve potom kontaktujte dodavatele nebo servisní organizaci.




before the process

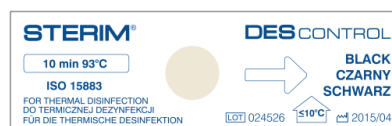

before the process



after the process

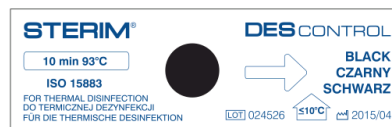

after the process

Poslední revize návodu: 31. 7. 2019