

Návod k použití

Sterilizační sáček plochý MEDSTER







Popis produktu

Navrženo jako balící řešení pro sterilizační použití, MEDSTER SafeCheck, Ploché Sterilizační Sáčky zajišťují zabezpečení zdravotních pomůcek a materiálů před mikroorganismy od sterilizace až k použití. Se svým rozpětím velikostí poskytuje široký výběr vhodných řešení balení pro vaše zdravotnické zásoby. Číslo šarže (LOT number) a datum spotřeby je na produktovém štítku. Náš produkt je vyroben z PET/PP kopolymerové folie a zdravotního kraftového papíru. Indikátory Ethylenoxidu (EO), Páry a Formaldehydu (FO) mohou být vytištěny na produktu. Naše produkty splňují požadavky výkonu specifikovány v ISO 11607, ISO 11140-1 a EN 868-5 standardech. Životnost produktu je 5 let.

Návod

- Umístěte zdravotní pomůcku/materiál ke sterilizaci dovnitř MEDSTER SafeCheck plochého sáčku.
- Nezaplňujte sáčky z více než 75% jejich kapacity.
- Pro správné proudění vzduchu vždycky nechte mezeru o alespoň 1,5 cm mezi zdravotními pomůckami/materiálem ke sterilizaci a každým zataveným okrajem sáčku.
- Zatavte otevřenou stranu sáčku se schváleným a kalibrovaným tavícím zařízením.
- Když umísťujete sáčky do sterilizátoru, umístěte je v košíku fólií proti fólii a papírem proti papíru.
- Nepoužívejte vlhké sáčky. Opakujte sterilizační proces po výměně vlhkých sáčků.
- Pro čisté odtržení vždycky otevírejte sáček pomalu a tak, jak je naznačeno na produktu.
- Nepoužívejte sáček, pokud je protržený, nezměnil barvu na požadovanou, nebo pokud byl poškozen.



















Stavy Indikátoru

STERILIZAČNÍ METODA	PŘED STERILIZACÍ	PO STERILIZACI
EthylenOxid		
Pára		
Formaldehyd		

Informace o skladování a likvidaci

- Nevystavujte přímému slunečnímu svitu a udržujte v suchu.
- Udržujte mezi 0°C a 40°C a maximálně uskladňujte při 70% RH vlhkosti vzduchu.
- Uskladňujte v originálním balení.
- Zlikvidujte v souladu s místem použití a místními regulacemi.

Symbole a jejich použití na produktu, štítku a uživatelské příručce

SYMBOL	VÝZNAM	SYMBOL	VÝZNAM	SYMBOL	VÝZNAM
	Informace o výrobcí		Datum výroby (měsíc/rok)		Na jedno použití
	Číslo šarže		Datum spotřeby		CE symbol
	Referenční číslo		Jedinečné ID		Zdravotní zařízení
	Nevystavujte slunečnímu svitu		Udržujte v suchu		Skladujte při teplotách 0°C až 40°C
	Max. 70% vlhkost vzduchu		Bez kovů		Bez olova
	Vhodné pro parní sterilizaci		Vhodné pro sterilizaci EthylemOxidem		Vhodné pro sterilizaci Formaldehydem

Informace o balení a výrobku

PRODUKTOVÝ KÓD	POPIS PRODUKTU	VELIKOST SÁČKU	MNOŽSTVÍ V BALENÍ
SRZ0505	Flat Sterilization Pouch with 2 indicators	5cm x 5cm	5000/2000
SRZ0575	Flat Sterilization Pouch with 2 indicators	5cm x 7,5cm	5000/2000
SRZ0510	Flat Sterilization Pouch with 2 indicators	5cm x 10cm	5000/2000
SRZ0515	Flat Sterilization Pouch with 2 indicators	5cm x 15cm	5000/2000
SRZ0520	Flat Sterilization Pouch with 2 indicators	5cm x 20cm	5000/2000
SRZ0525	Flat Sterilization Pouch with 2 indicators	5cm x 25cm	5000/2000
SRZ0530	Flat Sterilization Pouch with 2 indicators	5cm x 30cm	5000/2000
SRZ0535	Flat Sterilization Pouch with 2 indicators	5cm x 35cm	5000/2000
SRZ0540	Flat Sterilization Pouch with 2 indicators	5cm x 40cm	5000/2000

PRODUKTOVÝ KÓD	POPIS PRODUKTU	VELIKOST SÁČKU	MNOŽSTVÍ V BALENÍ
SRZ0545	Flat Sterilization Pouch with 2 indicators	5cm x 45cm	5000/2000
SRZ0550	Flat Sterilization Pouch with 2 indicators	5cm x 50cm	5000/2000
SRZ7575	Flat Sterilization Pouch with 2 indicators	7,5cm x 7,5cm	5000/2000
SRZ7510	Flat Sterilization Pouch with 2 indicators	7,5cm x 10cm	5000/2000
SRZ7515	Flat Sterilization Pouch with 2 indicators	7,5cm x 15cm	5000/2000
SRZ7520	Flat Sterilization Pouch with 2 indicators	7,5cm x 20cm	5000/2000
SRZ7525	Flat Sterilization Pouch with 2 indicators	7,5cm x 25cm	5000/2000
SRZ7530	Flat Sterilization Pouch with 2 indicators	7,5cm x 30cm	5000/2000
SRZ7535	Flat Sterilization Pouch with 2 indicators	7,5cm x 35cm	5000/2000
SRZ7540	Flat Sterilization Pouch with 2 indicators	7,5cm x 40cm	5000/2000
SRZ7545	Flat Sterilization Pouch with 2 indicators	7,5cm x 45cm	5000/2000
SRZ7550	Flat Sterilization Pouch with 2 indicators	7,5cm x 50cm	5000/2000
SRZ1010	Flat Sterilization Pouch with 2 indicators	10cm x 10cm	5000/2000
SRZ1015	Flat Sterilization Pouch with 2 indicators	10cm x 15cm	5000/2000
SRZ1020	Flat Sterilization Pouch with 2 indicators	10cm x 20cm	5000/2000
SRZ1025	Flat Sterilization Pouch with 2 indicators	10cm x 25cm	5000/2000
SRZ1030	Flat Sterilization Pouch with 2 indicators	10cm x 30cm	5000/2000
SRZ1035	Flat Sterilization Pouch with 2 indicators	10cm x 35cm	5000/2000
SRZ1040	Flat Sterilization Pouch with 2 indicators	10cm x 40cm	5000/2000
SRZ1045	Flat Sterilization Pouch with 2 indicators	10cm x 45cm	5000/2000
SRZ1050	Flat Sterilization Pouch with 2 indicators	10cm x 50cm	5000/2000
SRZ1515	Flat Sterilization Pouch with 2 indicators	15cm x 15cm	5000/2000
SRZ1520	Flat Sterilization Pouch with 2 indicators	15cm x 20cm	5000/2000

PRODUKTOVÝ KÓD	POPIS PRODUKTU	VELIKOST SÁČKU	MNOŽSTVÍ V BALENÍ
SRZ1525	Flat Sterilization Pouch with 2 indicators	15cm x 25cm	5000/2000
SRZ1530	Flat Sterilization Pouch with 2 indicators	15cm x 30cm	5000/2000
SRZ1535	Flat Sterilization Pouch with 2 indicators	15cm x 35cm	5000/2000
SRZ1540	Flat Sterilization Pouch with 2 indicators	15cm x 40cm	5000/2000
SRZ1545	Flat Sterilization Pouch with 2 indicators	15cm x 45cm	5000/2000
SRZ1550	Flat Sterilization Pouch with 2 indicators	15cm x 50cm	5000/2000
SRZ2020	Flat Sterilization Pouch with 2 indicators	20cm x 20cm	5000/2000
SRZ2025	Flat Sterilization Pouch with 2 indicators	20cm x 25cm	5000/2000
SRZ2030	Flat Sterilization Pouch with 2 indicators	20cm x 30cm	5000/2000
SRZ2035	Flat Sterilization Pouch with 2 indicators	20cm x 35cm	2000/1000
SRZ2040	Flat Sterilization Pouch with 2 indicators	20cm x 40cm	2000/1000
SRZ2045	Flat Sterilization Pouch with 2 indicators	20cm x 45cm	2000/1000
SRZ2050	Flat Sterilization Pouch with 2 indicators	20cm x 50cm	2000/1000
SRZ2525	Flat Sterilization Pouch with 2 indicators	25cm x 25cm	2000/1000
SRZ2530	Flat Sterilization Pouch with 2 indicators	25cm x 30cm	2000/1000
SRZ2535	Flat Sterilization Pouch with 2 indicators	25cm x 35cm	2000/1000
SRZ2540	Flat Sterilization Pouch with 2 indicators	25cm x 40cm	2000/1000
SRZ2545	Flat Sterilization Pouch with 2 indicators	25cm x 45cm	2000/1000
SRZ2550	Flat Sterilization Pouch with 2 indicators	25cm x 50cm	2000/1000
SRZ3030	Flat Sterilization Pouch with 2 indicators	30cm x 30cm	2000/1000
SRZ3035	Flat Sterilization Pouch with 2 indicators	30cm x 35cm	2000/1000
SRZ3040	Flat Sterilization Pouch with 2 indicators	30cm x 40cm	2000/1000
SRZ3045	Flat Sterilization Pouch with 2 indicators	30cm x 45cm	2000/1000

PRODUKTOVÝ KÓD	POPIS PRODUKTU	VELIKOST SÁČKU	MNOŽSTVÍ V BALENÍ
SRZ3050	Flat Sterilization Pouch with 2 indicators	30cm x 50cm	2000/1000
SRZ3535	Flat Sterilization Pouch with 2 indicators	35cm x 35cm	2000/1000
SRZ3540	Flat Sterilization Pouch with 2 indicators	35cm x 40cm	2000/1000
SRZ3545	Flat Sterilization Pouch with 2 indicators	35cm x 45cm	2000/1000
SRZ3550	Flat Sterilization Pouch with 2 indicators	35cm x 50cm	2000/1000
SRZ4040	Flat Sterilization Pouch with 2 indicators	40cm x 40cm	2000/1000
SRZ4045	Flat Sterilization Pouch with 2 indicators	40cm x 45cm	2000/1000
SRZ4050	Flat Sterilization Pouch with 2 indicators	40cm x 50cm	2000/1000
SRZ4545	Flat Sterilization Pouch with 2 indicators	45cm x 45cm	2000/1000
SRZ4550	Flat Sterilization Pouch with 2 indicators	45cm x 50cm	2000/1000
SRZ5050	Flat Sterilization Pouch with 2 indicators	50cm x 50cm	2000/1000
SRZ05175	Flat Sterilization Pouch with 2 indicators	5cmx17,5cm	5000/2000
SRZ05225	Flat Sterilization Pouch with 2 indicators	5cmx22,5cm	5000/2000
SRZ75175	Flat Sterilization Pouch with 2 indicators	7,5cmx17,5cm	5000/2000
SRZ75225	Flat Sterilization Pouch with 2 indicators	7,5cmx22,5cm	5000/2000
SRZ3055	Flat Sterilization Pouch with 2 indicators	30cmx55cm	2000
SRZ3060	Flat Sterilization Pouch with 2 indicators	30cmx60cm	2000
SRZ10175	Flat Sterilization Pouch with 2 indicators	10cmx17,5cm	5000/2000
SRZ15175	Flat Sterilization Pouch with 2 indicators	15cmx17,5cm	5000/2000
SRZ3555	Flat Sterilization Pouch with 2 indicators	35cmx55cm	2000/1000
SRZ3560	Flat Sterilization Pouch with 2 indicators	35cmx60cm	2000/1000
SRZ4055	Flat Sterilization Pouch with 2 indicators	40cmx55cm	2000/1000
SRZ4060	Flat Sterilization Pouch with 2 indicators	40cmx60cm	2000/1000

PRODUKTOVÝ KÓD	POPIS PRODUKTU	VELIKOST SÁČKU	MNOŽSTVÍ V BALENÍ
SRZ10225	Flat Sterilization Pouch with 2 indicators	10cmx22,5cm	5000/2000
SRZ15225	Flat Sterilization Pouch with 2 indicators	15cmx22,5cm	5000/2000
SRZ20225	Flat Sterilization Pouch with 2 indicators	20cmx22,5cm	5000/2000
SRZ4555	Flat Sterilization Pouch with 2 indicators	45cmx55cm	2000/1000
SRZ4560	Flat Sterilization Pouch with 2 indicators	45cmx60cm	2000/1000
SRZ1512	Flat Sterilization Pouch with 2 indicators	15cmx12cm	5000/2000
SRZ0505-1	Sterilizační sáček plochý s 1 indikátorem, 60 gsm	5cm x 5cm	5000/2000
SRZ0575-1	Sterilizační sáček plochý s 1 indikátorem, 60 gsm	5cm x 7,5cm	5000/2000
SRZ0510-1	Sterilizační sáček plochý s 1 indikátorem, 60 gsm	5cm x 10cm	5000/2000
SRZ0515-1	Sterilizační sáček plochý s 1 indikátorem, 60 gsm	5cm x 15cm	5000/2000
SRZ0520-1	Sterilizační sáček plochý s 1 indikátorem, 60 gsm	5cm x 20cm	5000/2000
SRZ0525-1	Sterilizační sáček plochý s 1 indikátorem, 60 gsm	5cm x 25cm	5000/2000
SRZ0530-1	Sterilizační sáček plochý s 1 indikátorem, 60 gsm	5cm x 30cm	5000/2000
SRZ0535-1	Sterilizační sáček plochý s 1 indikátorem, 60 gsm	5cm x 35cm	5000/2000
SRZ0540-1	Sterilizační sáček plochý s 1 indikátorem, 60 gsm	5cm x 40cm	5000/2000
SRZ0545-1	Sterilizační sáček plochý s 1 indikátorem, 60 gsm	5cm x 45cm	5000/2000
SRZ0550-1	Sterilizační sáček plochý s 1 indikátorem, 60 gsm	5cm x 50cm	5000/2000
SRZ7575-1	Sterilizační sáček plochý s 1 indikátorem, 60 gsm	7,5cm x 7,5cm	5000/2000
SRZ7510-1	Sterilizační sáček plochý s 1 indikátorem, 60 gsm	7,5cm x 10cm	5000/2000
SRZ7515-1	Sterilizační sáček plochý s 1 indikátorem, 60 gsm	7,5cm x 15cm	5000/2000
SRZ7520-1	Sterilizační sáček plochý s 1 indikátorem, 60 gsm	7,5cm x 20cm	5000/2000
SRZ7525-1	Sterilizační sáček plochý s 1 indikátorem, 60 gsm	7,5cm x 25cm	5000/2000
SRZ7530-1	Sterilizační sáček plochý s 1 indikátorem, 60 gsm	7,5cm x 30cm	5000/2000

PRODUKTOVÝ KÓD	POPIS PRODUKTU	VELIKOST SÁČKU	MNOŽSTVÍ V BALENÍ
SRZ7535-1	Sterilizační sáček plochý s 1 indikátorem, 60 gsm	7,5cm x 35cm	5000/2000
SRZ7540-1	Sterilizační sáček plochý s 1 indikátorem, 60 gsm	7,5cm x 40cm	5000/2000
SRZ7545-1	Sterilizační sáček plochý s 1 indikátorem, 60 gsm	7,5cm x 45cm	5000/2000
SRZ7550-1	Sterilizační sáček plochý s 1 indikátorem, 60 gsm	7,5cm x 50cm	5000/2000
SRZ1010-1	Sterilizační sáček plochý s 1 indikátorem, 60 gsm	10cm x 10cm	5000/2000
SRZ1015-1	Sterilizační sáček plochý s 1 indikátorem, 60 gsm	10cm x 15cm	5000/2000
SRZ1020-1	Sterilizační sáček plochý s 1 indikátorem, 60 gsm	10cm x 20cm	5000/2000
SRZ1025-1	Sterilizační sáček plochý s 1 indikátorem, 60 gsm	10cm x 25cm	5000/2000
SRZ1030-1	Sterilizační sáček plochý s 1 indikátorem, 60 gsm	10cm x 30cm	5000/2000
SRZ1035-1	Sterilizační sáček plochý s 1 indikátorem, 60 gsm	10cm x 35cm	5000/2000
SRZ1040-1	Sterilizační sáček plochý s 1 indikátorem, 60 gsm	10cm x 40cm	5000/2000
SRZ1045-1	Sterilizační sáček plochý s 1 indikátorem, 60 gsm	10cm x 45cm	5000/2000
SRZ1050-1	Sterilizační sáček plochý s 1 indikátorem, 60 gsm	10cm x 50cm	5000/2000
SRZ1515-1	Sterilizační sáček plochý s 1 indikátorem, 60 gsm	15cm x 15cm	5000/2000
SRZ1520-1	Sterilizační sáček plochý s 1 indikátorem, 60 gsm	15cm x 20cm	5000/2000
SRZ1525-1	Sterilizační sáček plochý s 1 indikátorem, 60 gsm	15cm x 25cm	5000/2000
SRZ1530-1	Sterilizační sáček plochý s 1 indikátorem, 60 gsm	15cm x 30cm	5000/2000
SRZ1535-1	Sterilizační sáček plochý s 1 indikátorem, 60 gsm	15cm x 35cm	5000/2000
SRZ1540-1	Sterilizační sáček plochý s 1 indikátorem, 60 gsm	15cm x 40cm	5000/2000
SRZ1545-1	Sterilizační sáček plochý s 1 indikátorem, 60 gsm	15cm x 45cm	5000/2000
SRZ1550-1	Sterilizační sáček plochý s 1 indikátorem, 60 gsm	15cm x 50cm	5000/2000
SRZ2020-1	Sterilizační sáček plochý s 1 indikátorem, 60 gsm	20cm x 20cm	5000/2000
SRZ2025-1	Sterilizační sáček plochý s 1 indikátorem, 60 gsm	20cm x 25cm	5000/2000

PRODUKTOVÝ KÓD	POPIS PRODUKTU	VELIKOST SÁČKU	MNOŽSTVÍ V BALENÍ
SRZ2030-1	Sterilizační sáček plochý s 1 indikátorem, 60 gsm	20cm x 30cm	5000/2000
SRZ2035-1	Sterilizační sáček plochý s 1 indikátorem, 60 gsm	20cm x 35cm	2000/1000
SRZ2040-1	Sterilizační sáček plochý s 1 indikátorem, 60 gsm	20cm x 40cm	2000/1000
SRZ2045-1	Sterilizační sáček plochý s 1 indikátorem, 60 gsm	20cm x 45cm	2000/1000
SRZ2050-1	Sterilizační sáček plochý s 1 indikátorem, 60 gsm	20cm x 50cm	2000/1000
SRZ2525-1	Sterilizační sáček plochý s 1 indikátorem, 60 gsm	25cm x 25cm	2000/1000
SRZ2530-1	Sterilizační sáček plochý s 1 indikátorem, 60 gsm	25cm x 30cm	2000/1000
SRZ2535-1	Sterilizační sáček plochý s 1 indikátorem, 60 gsm	25cm x 35cm	2000/1000
SRZ2540-1	Sterilizační sáček plochý s 1 indikátorem, 60 gsm	25cm x 40cm	2000/1000
SRZ2545-1	Sterilizační sáček plochý s 1 indikátorem, 60 gsm	25cm x 45cm	2000/1000
SRZ2550-1	Sterilizační sáček plochý s 1 indikátorem, 60 gsm	25cm x 50cm	2000/1000
SRZ3030-1	Sterilizační sáček plochý s 1 indikátorem, 60 gsm	30cm x 30cm	2000/1000
SRZ3035-1	Sterilizační sáček plochý s 1 indikátorem, 60 gsm	30cm x 35cm	2000/1000
SRZ3040-1	Sterilizační sáček plochý s 1 indikátorem, 60 gsm	30cm x 40cm	2000/1000
SRZ3045-1	Sterilizační sáček plochý s 1 indikátorem, 60 gsm	30cm x 45cm	2000/1000
SRZ3050-1	Sterilizační sáček plochý s 1 indikátorem, 60 gsm	30cm x 50cm	2000/1000
SRZ3535-1	Sterilizační sáček plochý s 1 indikátorem, 60 gsm	35cm x 35cm	2000/1000
SRZ3540-1	Sterilizační sáček plochý s 1 indikátorem, 60 gsm	35cm x 40cm	2000/1000
SRZ3545-1	Sterilizační sáček plochý s 1 indikátorem, 60 gsm	35cm x 45cm	2000/1000
SRZ3550-1	Sterilizační sáček plochý s 1 indikátorem, 60 gsm	35cm x 50cm	2000/1000
SRZ4040-1	Sterilizační sáček plochý s 1 indikátorem, 60 gsm	40cm x 40cm	2000/1000
SRZ4045-1	Sterilizační sáček plochý s 1 indikátorem, 60 gsm	40cm x 45cm	2000/1000
SRZ4050-1	Sterilizační sáček plochý s 1 indikátorem, 60 gsm	40cm x 50cm	2000/1000

PRODUKTOVÝ KÓD	POPIS PRODUKTU	VELIKOST SÁČKU	MNOŽSTVÍ V BALENÍ
SRZ4545-1	Sterilizační sáček plochý s 1 indikátorem, 60 gsm	45cm x 45cm	2000/1000
SRZ4550-1	Sterilizační sáček plochý s 1 indikátorem, 60 gsm	45cm x 50cm	2000/1000
SRZ5050-1	Sterilizační sáček plochý s 1 indikátorem, 60 gsm	50cm x 50cm	2000/1000
SRZ05175-1	Sterilizační sáček plochý s 1 indikátorem, 60 gsm	5cmx17,5cm	5000/2000
SRZ05225-1	Sterilizační sáček plochý s 1 indikátorem, 60 gsm	5cmx22,5cm	5000/2000
SRZ75175-1	Sterilizační sáček plochý s 1 indikátorem, 60 gsm	7,5cmx17,5cm	5000/2000
SRZ75225-1	Sterilizační sáček plochý s 1 indikátorem, 60 gsm	7,5cmx22,5cm	5000/2000
SRZ3055-1	Sterilizační sáček plochý s 1 indikátorem, 60 gsm	30cmx55cm	2000/1000
SRZ3060-1	Sterilizační sáček plochý s 1 indikátorem, 60 gsm	30cmx60cm	2000/1000
SRZ10175-1	Sterilizační sáček plochý s 1 indikátorem, 60 gsm	10cmx17,5cm	5000/2000
SRZ15175-1	Sterilizační sáček plochý s 1 indikátorem, 60 gsm	15cmx17,5cm	5000/2000
SRZ3555-1	Sterilizační sáček plochý s 1 indikátorem, 60 gsm	35cmx55cm	2000/1000
SRZ3560-1	Sterilizační sáček plochý s 1 indikátorem, 60 gsm	35cmx60cm	2000/1000
SRZ4055-1	Sterilizační sáček plochý s 1 indikátorem, 60 gsm	40cmx55cm	2000/1000
SRZ4060-1	Sterilizační sáček plochý s 1 indikátorem, 60 gsm	40cmx60cm	2000/1000
SRZ10225-1	Sterilizační sáček plochý s 1 indikátorem, 60 gsm	10cmx22,5cm	5000/2000
SRZ15225-1	Sterilizační sáček plochý s 1 indikátorem, 60 gsm	15cmx22,5cm	5000/2000
SRZ20225-1	Sterilizační sáček plochý s 1 indikátorem, 60 gsm	20cmx22,5cm	5000/2000
SRZ4555-1	Sterilizační sáček plochý s 1 indikátorem, 60 gsm	45cmx55cm	2000/1000
SRZ4560-1	Sterilizační sáček plochý s 1 indikátorem, 60 gsm	45cmx60cm	2000/1000
SRZ1512-1	Sterilizační sáček plochý s 1 indikátorem, 60 gsm	15cmx12cm	5000/2000
SRZ0505-3	Sterilizační sáček plochý se 3 indikátory, 60 gsm	5cm x 5cm	5000/2000
SRZ0575-3	Sterilizační sáček plochý se 3 indikátory, 60 gsm	5cm x 7,5cm	5000/2000

PRODUKTOVÝ KÓD	POPIS PRODUKTU	VELIKOST SÁČKU	MNOŽSTVÍ V BALENÍ
SRZ0510-3	Sterilizační sáček plochý se 3 indikátory, 60 gsm	5cm x 10cm	5000/2000
SRZ0515-3	Sterilizační sáček plochý se 3 indikátory, 60 gsm	5cm x 15cm	5000/2000
SRZ0520-3	Sterilizační sáček plochý se 3 indikátory, 60 gsm	5cm x 20cm	5000/2000
SRZ0525-3	Sterilizační sáček plochý se 3 indikátory, 60 gsm	5cm x 25cm	5000/2000
SRZ0530-3	Sterilizační sáček plochý se 3 indikátory, 60 gsm	5cm x 30cm	5000/2000
SRZ0535-3	Sterilizační sáček plochý se 3 indikátory, 60 gsm	5cm x 35cm	5000/2000
SRZ0540-3	Sterilizační sáček plochý se 3 indikátory, 60 gsm	5cm x 40cm	5000/2000
SRZ0545-3	Sterilizační sáček plochý se 3 indikátory, 60 gsm	5cm x 45cm	5000/2000
SRZ0550-3	Sterilizační sáček plochý se 3 indikátory, 60 gsm	5cm x 50cm	5000/2000
SRZ7575-3	Sterilizační sáček plochý se 3 indikátory, 60 gsm	7,5cm x 7,5cm	5000/2000
SRZ7510-3	Sterilizační sáček plochý se 3 indikátory, 60 gsm	7,5cm x 10cm	5000/2000
SRZ7515-3	Sterilizační sáček plochý se 3 indikátory, 60 gsm	7,5cm x 15cm	5000/2000
SRZ7520-3	Sterilizační sáček plochý se 3 indikátory, 60 gsm	7,5cm x 20cm	5000/2000
SRZ7525-3	Sterilizační sáček plochý se 3 indikátory, 60 gsm	7,5cm x 25cm	5000/2000
SRZ7530-3	Sterilizační sáček plochý se 3 indikátory, 60 gsm	7,5cm x 30cm	5000/2000
SRZ7535-3	Sterilizační sáček plochý se 3 indikátory, 60 gsm	7,5cm x 35cm	5000/2000
SRZ7540-3	Sterilizační sáček plochý se 3 indikátory, 60 gsm	7,5cm x 40cm	5000/2000
SRZ7545-3	Sterilizační sáček plochý se 3 indikátory, 60 gsm	7,5cm x 45cm	5000/2000
SRZ7550-3	Sterilizační sáček plochý se 3 indikátory, 60 gsm	7,5cm x 50cm	5000/2000
SRZ1010-3	Sterilizační sáček plochý se 3 indikátory, 60 gsm	10cm x 10cm	5000/2000
SRZ1015-3	Sterilizační sáček plochý se 3 indikátory, 60 gsm	10cm x 15cm	5000/2000
SRZ1020-3	Sterilizační sáček plochý se 3 indikátory, 60 gsm	10cm x 20cm	5000/2000
SRZ1025-3	Sterilizační sáček plochý se 3 indikátory, 60 gsm	10cm x 25cm	5000/2000

PRODUKTOVÝ KÓD	POPIS PRODUKTU	VELIKOST SÁČKU	MNOŽSTVÍ V BALENÍ
SRZ1030-3	Sterilizační sáček plochý se 3 indikátory, 60 gsm	10cm x 30cm	5000/2000
SRZ1035-3	Sterilizační sáček plochý se 3 indikátory, 60 gsm	10cm x 35cm	5000/2000
SRZ1040-3	Sterilizační sáček plochý se 3 indikátory, 60 gsm	10cm x 40cm	5000/2000
SRZ1045-3	Sterilizační sáček plochý se 3 indikátory, 60 gsm	10cm x 45cm	5000/2000
SRZ1050-3	Sterilizační sáček plochý se 3 indikátory, 60 gsm	10cm x 50cm	5000/2000
SRZ1515-3	Sterilizační sáček plochý se 3 indikátory, 60 gsm	15cm x 15cm	5000/2000
SRZ1520-3	Sterilizační sáček plochý se 3 indikátory, 60 gsm	15cm x 20cm	5000/2000
SRZ1525-3	Sterilizační sáček plochý se 3 indikátory, 60 gsm	15cm x 25cm	5000/2000
SRZ1530-3	Sterilizační sáček plochý se 3 indikátory, 60 gsm	15cm x 30cm	5000/2000
SRZ1535-3	Sterilizační sáček plochý se 3 indikátory, 60 gsm	15cm x 35cm	5000/2000
SRZ1540-3	Sterilizační sáček plochý se 3 indikátory, 60 gsm	15cm x 40cm	5000/2000
SRZ1545-3	Sterilizační sáček plochý se 3 indikátory, 60 gsm	15cm x 45cm	5000/2000
SRZ1550-3	Sterilizační sáček plochý se 3 indikátory, 60 gsm	15cm x 50cm	5000/2000
SRZ2020-3	Sterilizační sáček plochý se 3 indikátory, 60 gsm	20cm x 20cm	5000/2000
SRZ2025-3	Sterilizační sáček plochý se 3 indikátory, 60 gsm	20cm x 25cm	5000/2000
SRZ2030-3	Sterilizační sáček plochý se 3 indikátory, 60 gsm	20cm x 30cm	5000/2000
SRZ2035-3	Sterilizační sáček plochý se 3 indikátory, 60 gsm	20cm x 35cm	2000/1000
SRZ2040-3	Sterilizační sáček plochý se 3 indikátory, 60 gsm	20cm x 40cm	2000/1000
SRZ2045-3	Sterilizační sáček plochý se 3 indikátory, 60 gsm	20cm x 45cm	2000/1000
SRZ2050-3	Sterilizační sáček plochý se 3 indikátory, 60 gsm	20cm x 50cm	2000/1000
SRZ2525-3	Sterilizační sáček plochý se 3 indikátory, 60 gsm	25cm x 25cm	2000/1000
SRZ2530-3	Sterilizační sáček plochý se 3 indikátory, 60 gsm	25cm x 30cm	2000/1000
SRZ2535-3	Sterilizační sáček plochý se 3 indikátory, 60 gsm	25cm x 35cm	2000/1000

PRODUKTOVÝ KÓD	POPIS PRODUKTU	VELIKOST SÁČKU	MNOŽSTVÍ V BALENÍ
SRZ2540-3	Sterilizační sáček plochý se 3 indikátory, 60 gsm	25cm x 40cm	2000/1000
SRZ2545-3	Sterilizační sáček plochý se 3 indikátory, 60 gsm	25cm x 45cm	2000/1000
SRZ2550-3	Sterilizační sáček plochý se 3 indikátory, 60 gsm	25cm x 50cm	2000/1000
SRZ3030-3	Sterilizační sáček plochý se 3 indikátory, 60 gsm	30cm x 30cm	2000/1000
SRZ3035-3	Sterilizační sáček plochý se 3 indikátory, 60 gsm	30cm x 35cm	2000/1000
SRZ3040-3	Sterilizační sáček plochý se 3 indikátory, 60 gsm	30cm x 40cm	2000/1000
SRZ3045-3	Sterilizační sáček plochý se 3 indikátory, 60 gsm	30cm x 45cm	2000/1000
SRZ3050-3	Sterilizační sáček plochý se 3 indikátory, 60 gsm	30cm x 50cm	2000/1000
SRZ3535-3	Sterilizační sáček plochý se 3 indikátory, 60 gsm	35cm x 35cm	2000/1000
SRZ3540-3	Sterilizační sáček plochý se 3 indikátory, 60 gsm	35cm x 40cm	2000/1000
SRZ3545-3	Sterilizační sáček plochý se 3 indikátory, 60 gsm	35cm x 45cm	2000/1000
SRZ3550-3	Sterilizační sáček plochý se 3 indikátory, 60 gsm	35cm x 50cm	2000/1000
SRZ4040-3	Sterilizační sáček plochý se 3 indikátory, 60 gsm	40cm x 40cm	2000/1000
SRZ4045-3	Sterilizační sáček plochý se 3 indikátory, 60 gsm	40cm x 45cm	2000/1000
SRZ4050-3	Sterilizační sáček plochý se 3 indikátory, 60 gsm	40cm x 50cm	2000/1000
SRZ4545-3	Sterilizační sáček plochý se 3 indikátory, 60 gsm	45cm x 45cm	2000/1000
SRZ4550-3	Sterilizační sáček plochý se 3 indikátory, 60 gsm	45cm x 50cm	2000/1000
SRZ5050-3	Sterilizační sáček plochý se 3 indikátory, 60 gsm	50cm x 50cm	2000/1000
SRZ05175-3	Sterilizační sáček plochý se 3 indikátory, 60 gsm	5cm x 17,5cm	5000/2000
SRZ05225-3	Sterilizační sáček plochý se 3 indikátory, 60 gsm	5cm x 22,5cm	5000/2000
SRZ75175-3	Sterilizační sáček plochý se 3 indikátory, 60 gsm	7,5cm x 17,5cm	5000/2000
SRZ75225-3	Sterilizační sáček plochý se 3 indikátory, 60 gsm	7,5cm x 22,5cm	5000/2000
SRZ3055-3	Sterilizační sáček plochý se 3 indikátory, 60 gsm	30cm x 55cm	2000/1000

PRODUKTOVÝ KÓD	POPIS PRODUKTU	VELIKOST SÁČKU	MNOŽSTVÍ V BALENÍ
SRZ3060-3	Sterilizační sáček plochý se 3 indikátory, 60 gsm	30cmx60cm	2000/1000
SRZ10175-3	Sterilizační sáček plochý se 3 indikátory, 60 gsm	10cmx17,5cm	5000/2000
SRZ15175-3	Sterilizační sáček plochý se 3 indikátory, 60 gsm	15cmx17,5cm	5000/2000
SRZ3555-3	Sterilizační sáček plochý se 3 indikátory, 60 gsm	35cmx55cm	2000/1000
SRZ3560-3	Sterilizační sáček plochý se 3 indikátory, 60 gsm	35cmx60cm	2000/1000
SRZ4055-3	Sterilizační sáček plochý se 3 indikátory, 60 gsm	40cmx55cm	2000/1000
SRZ4060-3	Sterilizační sáček plochý se 3 indikátory, 60 gsm	40cmx60cm	2000/1000
SRZ10225-3	Sterilizační sáček plochý se 3 indikátory, 60 gsm	10cmx22,5cm	5000/2000
SRZ15225-3	Sterilizační sáček plochý se 3 indikátory, 60 gsm	15cmx22,5cm	5000/2000
SRZ20225-3	Sterilizační sáček plochý se 3 indikátory, 60 gsm	20cmx22,5cm	5000/2000
SRZ4555-3	Sterilizační sáček plochý se 3 indikátory, 60 gsm	45cmx55cm	2000/1000
SRZ4560-3	Sterilizační sáček plochý se 3 indikátory, 60 gsm	45cmx60cm	2000/1000
SRZ1512-3	Sterilizační sáček plochý se 3 indikátory, 60 gsm	15cmx12cm	5000/2000