

# NÁVOD K POUŽITÍ

## Inner Pack S, M

### Inner pack – řešení posterilizační vlhkosti v sítěch a kontejnerech

**Objednací čísla**

253 385 333 101 – Inner pack S – 5 x 20 cm, 2 kusy v balení, absorpce až 80 ml

253 385 333 102 – Inner pack M – 9 x 20 cm, 2 kusy v balení, absorpce až 160 ml

**Popis výrobku:**

Vnější pevný karton s otvory pro průnik vlhkosti obsahuje uvnitř archy vysoce savého materiálu. Dvě velikosti výrobku umožňují vyřešit nadměrnou vlhkost jak v sítěch (nízký profil 5 cm), tak i v kontejnerech (profil 9 cm). Výrobek je jednorázový.

**Návod k použití:**

Vyjměte absorpční balíčky Inner pack z vnějšího obalu a vložte proti sobě do síta nebo kontejneru spolu s materiálem určeným ke sterilizaci. Tento způsob použití zvyšuje účinnost absorpčních schopností balíčku. Uzavřete systém balení, vložte do sterilizátoru a nechte proběhnout sterilizační cyklus. Vlhkost penetruje ze všech stran i vytvořenými otvory do vnitřní výplně, tedy vysoce savého materiálu. Po vysterilizování zůstává vlhkost uzavřena uvnitř balíčku Inner pack. Při otevření kontejneru nebo vyjmutí síta z obalu obsluha balíček vyhodí do odpadu.

**Upozornění:**

Výrobek je určen pro jednorázové použití v parních sterilizátorech pro redukci posterilizační vlhkosti na nástrojích.


Použitý výrobek lze kontrolovat podle sterilizačních testů na etiketách, typu 1

Po dobu skladování nepoužitých výrobků dbejte na ochranu výrobku před kontaktem s chemikáliemi i před vlhkostí.

Nepoužívejte výrobek, pokud byl nevhodným skladováním jakkoliv znehodnocen.

Inner pack není zdravotnickým prostředkem.

Spotřebujte do uvedeného data.

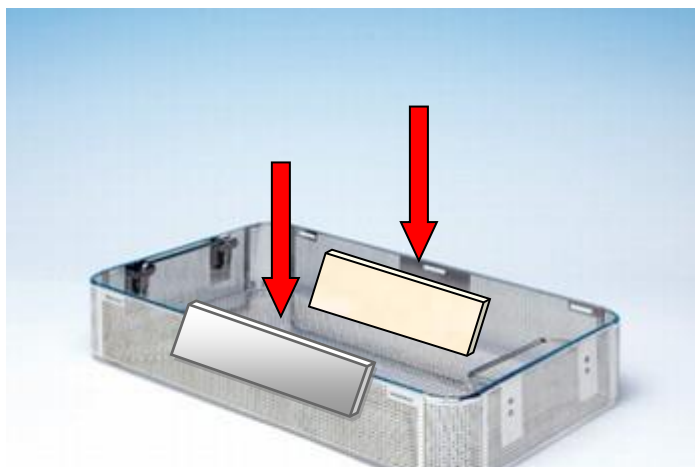

správné uložení balíčku Inner pack do síta