


Lumenia 122

Sada pro zátěžovou zkoušku čištění

v automatech pro reprocessing endoskopů

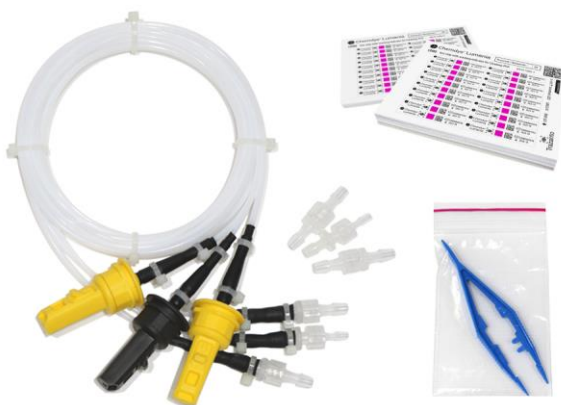

Použití

Sada pro zátěžovou zkoušku je určena k testování efektivity mycích procesů při čištění endoskopů v automatických zařízeních pro jejich reprocessing.

Předpisy a nařízení

Výroba je řízena systémem managementu kvality ISO 13485:2016/NS EN ISO 13485:2016
ISO 15883-4:2018, ISO/TS 15883-5:2005

Popis

Zátěžové tělísko

Chemdye Lumenia 122 sada pro monitoring mycích procesů v automatických zařízeních pro reprocessing endoskopů obsahuje zátěžové tělísko CCDER122 a indikátory mytí CDWE. Zátěžové tělísko se skládá ze tří trubiček vysoké pevnosti a odolnosti z materiálu PTFE. Jedna má průměr 1 mm a dvě mají průměr 2 mm. Všechny jsou dlouhé 2 m. Každá je opatřena na jedné straně nástavcem sloužícím pro napojení tělíska v mycím zařízení a na druhé straně tělískem, které simuluje duté části endoskopu a do něj se vkládá indikátor. Indikátory se vkládají do tělíska dva: jeden do vnitřní dutiny a druhý do vnější štrbiny.

Indikátor mytí

Chemdye Lumenia CDWE indikátor mytí byl navržen speciálně pro monitoring mycích procesů. Skládá se z testovacího proužku z termolabilního syntetického materiálu a na něm nanesené skvrny simulující znečištění podle požadavků normy ISO/TS 15883-5:2005. Proužky jsou samolepicí. Konstrukce indikátorů umožňuje detekci faktorů, které během mycích procesů ovlivňují úroveň odmytí nečistot.

Velikost: 38 x 6 mm

Počáteční barva: fialovo-růžová

Konečný výsledek: úplné odmytí substance

Bez toxických látek.

Poznámka

Pokud není dosaženo optimálního výsledku a na indikátoru jsou zbytky znečištění, zkontrolujte nejprve správnost koncentrace mycího roztoku, tlak vody, teplotu lázně, čas mycího cyklu a ostatní důležité podmínky, kterých má být v mycích zařízeních dosaženo.

Podmínky během výroby

15 - 30 °C, RVV 30 - 80 %

Skladovací podmínky

10 - 30 °C, RVV 30 - 80 %

Přepravní podmínky

Během přepravy musí být striktně dodrženy podmínky pro skladování.

Přepravujte v uzavřeném pevném obalu, abyste zabránili poškození výrobku.

Přepravování výrobku nepředstavuje žádné riziko pro lidské zdraví.

Doba použitelnosti

Zátěžové tělísko: 200 cyklů

Indikátor mytí: 5 let

Balení1 zátěžové tělísko + 120 mycích indikátorů + 3 svorky +
plastová pinzetaPříbalová informace: popis výrobku, použitelnost, označení,
odkaz na platnou legislativu, podmínky skladování, výrobní
informace, značení na etiketě**Označení**Na obalu je vyznačeno: kód výrobku, šarže, datum výroby, da-
tum spotřeby, čárový kód, datamatrix kód**Použitelnost**

Zdravotnictví, zdravotnický průmysl

Další důležité informace

Před použitím si důkladně prostudujte návod k použití

Případná rizika spojená s použitím výrobku

Výrobek skladujte pouze v originálním obalu

Chraňte před přímým světlem, dezinfekčními prostředky a
vlhkostí

Nepoužívejte opakovaně

Nedotýkejte se indikátorové skvrny