

NÁVOD K POUŽITÍ

NÁZEV PRODUKTU

Medster SafeCheck Sterilizační obal


POPIS PRODUKTU

Sterilizační obal pro balení a následnou sterilizaci zdravotnických prostředků se speciální strukturou pórů, různé vlastnosti a rozměry.


POUŽITÍ

- 1- Použijte vhodnou velikost balicího papíru v závislosti na velikosti materiálu, který má být sterilizován.
- 2- Typ balicího archu se určí s ohledem na hmotnost a druh materiálu.
- 3- Aby se zabránilo pronikání mikroorganismů a pro bezpečnější a pevnější balení je třeba provést dvojitě zabalení. Řiďte se přitom národní legislativou.
- 4- Balení se provádí podle níže uvedeného popisu:

Obálková metoda:

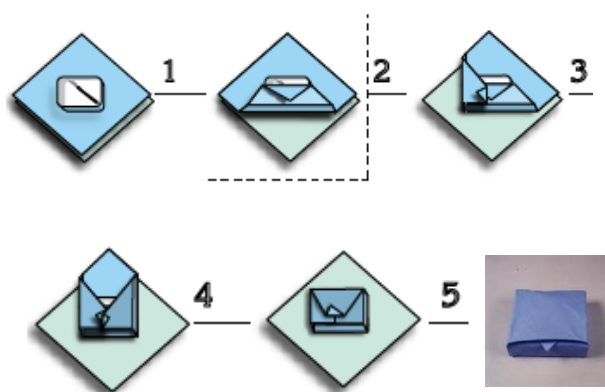

Dvojitý obal:

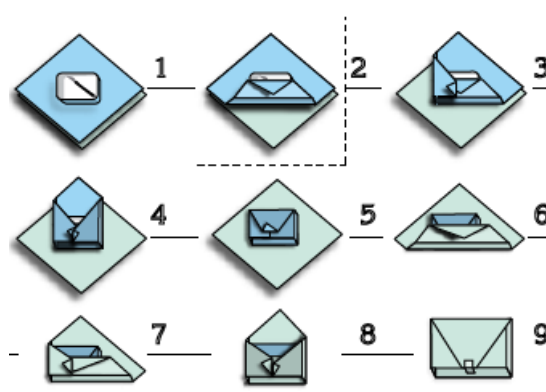

- 5- Při balení se upřednostňují autoklávové pásky s indikátory.
- 6- Do balení se umístí test sterilizace, aby se ověřilo, zda je proces sterilizace proveden či nikoli.
- 7- Balicí archy jsou odolné vůči sterilizaci párou při 121 ° C a 134 ° C.
- 8- Balicí archy jsou vhodné pro sterilizaci parou, ethylenoxidem, formaldehydem, plazmou (bez obsahu celulózy) a gama sterilizací.
- 9- Balicí archy jsou na jedno použití. V případě opakování sterilizačního procesu je nutné vyměnit obalový materiál.
- 10- Po sterilizaci je třeba dbát na to, aby nedošlo k poškození obalů.
- 11- Sterilizované obaly se skladují ve zvláštních místnostech a uchovávají se na policích.
- 12- Balení musí být chráněna před přímým slunečním zářením, vlhkostí a na místech bez rizika kontaminace.
- 13- Sterilizované balení zachovává vlastnosti bakteriální bariéry po dobu 6 měsíců při skladování za doporučených podmínek. Je však nutné dodržet místní vyhlášku.
- 14- V případě použití obalů musí být vnější obal nejprve odstraněn z pracovního prostředí. Poté musí být vnitřní obal odstraněn na pracovním místě.

PODMÍNKY SKLADOVÁNÍ

Skladujte při teplotě max. + 35 °C a vlhkostí max. 70 %. Sterilizační materiál má trvanlivost 5 let při dodržení skladovacích podmínek.

Obalové materiály, ať už sterilizované nebo ne, musí být chráněny před nadměrnou vlhkostí, prouděním vzduchu a přímým slunečním zářením.

MEDSTER TIBBİ CİHAZ VE SAĞLIK HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.

Malıköy Başkent OSB Mah. 19. Cad. No:51 Sincan/Ankara/Türkiye

Tel: +90 312 387 05 50 Fax: +90 312 387 05 51

E-mail: info@medster.com.tr Web: www.medster.com.tr